



SYMBIO fem[®]
PROTECT

Bade- und Schutztampons



Für Ihre Gesundheit

Symbiofem® protect

Der neuartige patentgeschützte Bade- und Schutztampon vermindert das Eindringen von chloriertem oder verschmutztem Wasser in den Intimbereich. Wer Zeit, Geld und Ambitionen in Gesundheit und Wellness investiert, sucht alles andere – nur keine Infektionen. Das Bade- oder Schwimmvergnügen wird aber leider allzu oft von Infektionen getrübt, die man sich in verunreinigtem Wasser geholt hat.

Symbiofem® protect ist ein völlig neuartiger, mit reinem Vaseline-Öl getränkter Tampon, der speziell dafür entwickelt wurde, den weiblichen Intimbereich beim Baden oder Schwimmen zu schützen.

Symbiofem® protect gibt Ihnen ein gutes Gefühl, weil es den Kontakt mit chloriertem oder eventuell verunreinigtem Wasser vermindert.

WICHTIG: Sie finden die Gebrauchsanleitung und Hinweise für Ihre Gesundheit auf den folgenden Seiten. Bitte lesen Sie diese gründlich, bevor Sie Symbiofem® protect das erste Mal verwenden.



Wenn Sie zum ersten Mal **Symbiofem® protect** Bade- und Schutztampons verwenden, finden Sie in der Gebrauchsanleitung wichtige Informationen.

Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons wurden speziell für Frauen entwickelt, die auf Hygiene beim Baden und Schwimmen Wert legen.




Dieser Tampon vermindert das Eindringen von z.B. chloriertem oder eventuell verunreinigtem Wasser und schützt somit besser den weiblichen Intimbereich beim Baden und Schwimmen. Dadurch wird auch die Angriffsfläche für Bakterien und Pilze in der Scheide verringert.

Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons bieten Ihnen Sicherheit und Komfort

- Der Tampon ist mit reinem Vaseline-Öl getränkt, das eine wasserabweisende Wirkung hat und dadurch das Eindringen von Wasser in die Scheide erschwert
- In der Größe entsprechen **Symbiofem® protect** Bade- und Schutztampons herkömmlichen Tampons der Größe „Normal“
- Die Rundkuppe ermöglicht leichtes und sanftes Einführen des Tampons
- Die weiche Vliesumhüllung sorgt dafür, dass der Tampon auch beim Entfernen seine Form behält
- **Symbiofem® protect** Bade- und Schutztampons können Sie auch an den Tagen der ausklingenden Menstruation verwenden. Sie sind leicht einzuführen und auch leicht zu entfernen
- **Symbiofem® protect** Bade- und Schutztampons können auch von gesunden schwangeren Frauen mit unauffälligem Schwangerschaftsverlauf angewendet werden

So verwenden Sie Symbiofem® protect Bade- und Schutztampons richtig:

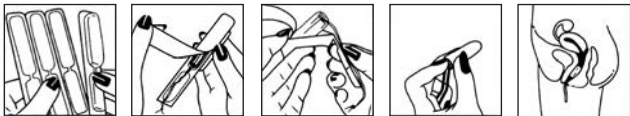

Bitte waschen Sie sich zuerst gründlich die Hände. Trennen Sie eine Einzelpackung an der Perforation ab, entfernen Sie die Folie und drücken Sie den Tampon aus der Verpackung. Nach Auseinanderziehen des Bändchens weiten Sie das Tamponende, so dass eine kleine Vertiefung entsteht.

Nun stecken Sie die Spitze des Zeigefingers in die Vertiefung am Tamponende. Führen Sie den Tampon so tief in die Scheide ein, dass Sie ihn nicht mehr spüren.

Achten Sie darauf, dass das Rückholbändchen so weit aus der Scheide heraushängt, dass Sie es gut fassen können.



Hinweis zur Tragedauer:

Es wird empfohlen, den Tampon vor dem Baden bzw. Schwimmen einzuführen und am besten alle 3 bis 4 Stunden zu wechseln.

So wird der Symbiofem® protect Bade- und Schutztampon entfernt:

Ziehen Sie den Tampon einfach am Rückholbändchen vorsichtig heraus.

Hinweis zur Aufbewahrung:

Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinwirkung geschützt werden. Trocken lagern.

Wichtiger Hinweis für Ihre Gesundheit:

In seltenen Fällen können während der Menstruation Symptome wie hohes Fieber (über 39° C), Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl oder Hautausschlag auftreten. Obwohl eine harmlose Krankheit ebenso beginnen kann, könnte es auch eine ganz bestimmte bakterielle Infektion (TSS: Toxic Shock Syndrom) mit schwerwiegenden Folgen sein. Bitte entfernen Sie bei Auftreten der beschriebenen Symptome den Tampon, suchen Sie sofort einen Arzt auf und teilen Sie ihm mit, dass Sie menstruieren.

Persönliche Beratung:

Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns bitte.

Wir beraten Sie gern und beantworten Ihren Brief persönlich und diskret.



Kennen Sie schon unser **SymbioVag®** – Vaginalzäpfchen zur Stabilisierung eines gesunden Vaginalmilieus. **SymbioVag®** gibt es in jeder Apotheke.

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.symbiopharm.de.



