

## Gebrauchsanweisung

*Beruhigt und lindert gereizte Augen.*

**Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.**

# Herba-Vision® Augentrost sine (Euphrasia)

mit Hyaluronat

20 x 0,4 ml Augentropfen,  
5 x 0,4 ml Augentropfen

Konservierungsmittelfreie Benetzungslösung für das Auge mit 0,05 % Augentrosttinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Augentrost sine Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

### Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält  
0,5 mg Natrium-Hyaluronat  
0,5 mg Augentrosttinktur (HAB 2000)  
2,5 mg HPMC (Methocel®)

Medizinprodukt  
CE 0473

### Anwendung:

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

### Hinweise:

Kühl und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

### Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Tropferspitze nicht berühren. Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt. Da Herba-Vision® Augentrost sine keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

### Stand der Information:

November 2010



OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 7  
D-82178 Puchheim