

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

bitte lesen Sie diese Information aufmerksam, bevor Sie **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** anwenden.

HEBEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF, DENN SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN. Bei Fragen zu **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder direkt an uns.

1. Was sind Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen und wofür werden sie angewendet?

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen sind ein Medizinprodukt, das 2 % Ectoin enthält - ein natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungslindernden und membranstabilisierenden Eigenschaften, sowie Hyaluronsäure, welche durch ihr hohes Wasserbindungsvermögen das Auge beruhigt.

- **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** sind eine isotonische Lösung und können zur unterstützenden Behandlung sowie zur Vorbeugung von Symptomen bei einer saisonalen als auch ganzjährigen allergischen Bindehautentzündung aufgrund von Einflüssen wie z. B. Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaaren und Schimmelpilzen angewendet werden. Juckende, gereizte, rote oder tränende Augen werden wirksam gelindert.
- **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** stabilisieren den natürlichen Tränenfilm und haben einen positiven Einfluss auf die wässrige Phase (Hyaluronsäure) als auch auf die Lipid-Phase (Ectoin) des Tränenfilms. Durch dieses duale Wirkprinzip wird das Auge vor schädlichen Allergeneinflüssen geschützt und der Regenerationsprozess der gereizten und sensiblen Bindehaut unterstützt.
- **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** enthalten keinerlei Konservierungsstoffe und sind auch für Kontaktlinienträger sowie für Personen mit empfindlichen Augen geeignet.

2. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** sollten im Falle einer Überempfindlichkeit gegenüber Ectoin, Hyaluronsäure oder einem der anderen Inhaltsstoffe der Augentropfen nicht angewendet werden.
- Wenn vom Arzt empfohlen, können **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** auch nach Augenoperationen und / oder Verletzungen angewendet werden.
- Falls es zu allergischen Reaktionen kommt, muss die Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** sofort beendet werden.
- Aus hygienischen Gründen sollte die Tropfflasche nur von einer Person angewendet werden.
- **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** können nach dem Öffnen 6 Wochen lang verwendet werden.

3. Was sollten Sie vor der Anwendung von Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen wissen?

Es sind keine Wechselwirkungen zwischen **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** und anderen Augentropfen oder lokal am Auge angewendeten Salben bekannt.

Warten Sie nach der Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** mindestens 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Medizinprodukt oder Arzneimittel am Auge anwenden.

4. Was sollte während einer Schwangerschaft oder Stillzeit beachtet werden?

Es liegen derzeit keine Daten zur Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** während der Schwangerschaft oder Stillzeit vor.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
- nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind.

5. Wie wenden Sie Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen an?

Wenden Sie **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** stets entsprechend dieser Gebrauchsanweisung an. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung um Rat wenn Sie sich nicht sicher sind.


Wenn von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, geben Sie mehrmals täglich 1-2 Tropfen in jedes Auge. Kinder unter 10 Jahren sollten bei der Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** von einem Erwachsenen unterstützt werden.

Bitte beachten Sie, dass bei erstmaligem Gebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch ein Anpumpen der Lösung notwendig ist. Beim Anpumpen der Lösung sollte die Flasche mit der Tropfspitze nach unten gehalten werden.


Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen**:

Dank des Pumpmechanismus von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** sind die Augentropfen frei von Konservierungsstoffen, sehen jedoch möglicherweise anders aus als die Augentropfflaschen, die Sie bisher angewendet haben.


Die Abbildungen zeigen die einfache Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen**.

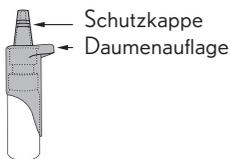

1. Entfernen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe von der Spitze der Flasche. Achten Sie darauf, dass Sie die Tropfspitze nicht mit Ihren Fingern berühren.

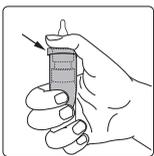

2. Legen Sie Ihren Daumen auf die ergonomische Daumenauflage, und umschließen Sie den unteren Teil der Flasche mit den anderen Fingern. Zwei Finger sollten Sie dabei am Boden der Flasche platzieren.

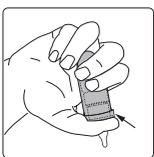

3. Drehen Sie die Flasche um und halten Sie sie so, wie auf der Abbildung gezeigt. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal verwenden, sind erst einige Pumpbewegungen notwendig. Drücken Sie dazu die Daumenauflage etwa sieben Mal herunter, bis der erste Tropfen erscheint.



4. Neigen Sie den Kopf zum Einträufeln des Tropfens etwas nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten. Drücken Sie vorsichtig auf die Daumenauflage, um einen Tropfen in das Auge einzutropfen. Schließen Sie anschließend das Auge, bewegen Sie es leicht nach rechts und links und blinzeln Sie, um den Tropfen optimal auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Wenn Sie möchten, können Sie die andere Hand zur Unterstützung und für eine bessere Genauigkeit beim Eintropfen hinzunehmen.

5. Achten Sie darauf, dass die Tropfspitze nicht mit Ihren Augen oder Fingern in Berührung kommt, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
6. Setzen Sie sofort nach jeder Anwendung die Schutzkappe der Flasche wieder auf die Flaschenspitze.
7. Wiederholen Sie die Anwendung am anderen Auge.

6. Mögliche Nebenwirkungen von Vividrin® ectoin® MDO

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen sind gut verträglich. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

In einzelnen Fällen konnte die Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** eine kurzzeitige, vorübergehende Augenirritation, Augenrötung oder Bindehautentzündung verursachen. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, falls Sie Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** bemerken.

Falls die Beschwerden anhalten oder sich verschlimmern, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

7. Wie werden Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen aufbewahrt?

Das Mindestverwendbarkeitsdatum von **Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen** ist auf der Verpackung und auf der Flasche aufgedruckt.

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen dürfen nach Ablauf des Mindestverwendbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen sollten bei 2°C -25°C aufbewahrt werden.

Wo erhalten Sie Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen? Welche Packungsgrößen stehen zur Verfügung?

Vividrin® ectoin® MDO Augentropfen sind rezeptfrei in Packungen zu 1 x 10 ml in Apotheken erhältlich.

Inhaltsstoffe

Ectoin 2 %, Hyaluronsäure, Natriumchlorid, Wasser

8. Hersteller

 bitop AG, Stockumer Str. 28, 58453 Witten,
Deutschland



Vertrieb

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin
(ein Unternehmen von Bausch + Lomb Incorporated)

E-Mail: kontakt@bausch.com

www.vividrin.de

9. Datum der Information

Juli 2015, Rev. 01

Erläuterung der auf dem Produkt verwendeten Symbole

	CE-Symbol mit Nummer der benannten Stelle
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten.
	Chargennummer
	Verwendbar bis
	Sterilisiert durch aseptische Filtration
	Temperaturbegrenzung
	Achtung: Warnhinweise beachten!
	Das Medizinprodukt kann nach dem ersten Öffnen 1,5 Monate (6 Wochen) verwendet werden.
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.