

Spezialprodukte für die Entstauung

Therapiekonzept für eine
gezielte Ödemversorgung

Juzo Kundenservice

DE · Tel.: +49 (0)8251 9010 · Fax: 0800 08 35 393 · E-Mail: bestellung@juzo.de

Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Deutschland · info@juzo.de · www.juzo.de

DEU · 14024001/8/9 · 8511 LY · 09/2018
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



www.juzo.com

Lebensfreude in Bewegung



Spezialprodukte für die Entstauung

Selbstbandagierung

Der Patient aktiv in der Ödemtherapie	04
Aufklärung und Schulung des Patienten	05
Innovative Hilfen für die ergänzende Selbstbandagierung	05

Juzo SoftCompress

Kompressionsbandagierung	07
Bandagehilfen	08
LymphAid und BandageAid	10
Kompressionsbinde und Kompressionsplatte	13
Zusatzprodukte	14

Juzo ACS Light

Variable Kompressionssysteme	19
Segmente für die untere Extremität	20
Segmente für die obere Extremität	24
Zubehör	26

Ergänzende Produkte

Juzo Liner	28
Zusatzprodukte	29

Wichtige Informationen

Materialzusammensetzung	30
Wasch- und Pflegeanleitung	30
Kontraindikationen	30

Selbstbandagierung

Der Patient aktiv in der Ödemtherapie

Die Standardtherapie des Lymphödems ist die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), die gemäß der am 23. Mai 2017 neu veröffentlichten medizinischen Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Lymphödeme“ um einen neuen Baustein ergänzt worden ist. Neu ist die aktive Einbindung des Patienten: Die Aufklärung und Schulung zur individuellen Selbsttherapie wurde als fünfte Komponente in die KPE mit aufgenommen. Alle Maßnahmen der KPE (Manuelle Lymphdrainage (MLD), Kompressionstherapie, entstauende Bewegungs- und Atemtherapie, Hautpflege und Hautsanierung) sollen aufeinander abgestimmt und in Kombination angewendet werden – denn nur gemeinsam sichern sie den langfristigen Therapieerfolg.



Die KPE ist eine 2-Phasen-Therapie: Phase 1 (Entstauungsphase) bezweckt die Mobilisierung des Ödems – in Phase 2 (Erhaltungsphase) wird der Therapieerfolg konserviert und optimiert. Die Mithilfe und das Mitwirken des Patienten sind in jeder Phase und bei jeder der einzelnen KPE-Maßnahmen wichtig.

Es gilt, die Beschwerden zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben zu ermöglichen und Komplikationen vorzubeugen. Die Kombination der KPE mit der Aufklärung und Schulung zum Selbstmanagement sichert den langfristigen Behandlungserfolg. Dabei ist die effektive Zusammenarbeit zwischen Arzt, Lymphtherapeut, medizinischem Fachhandel und betroffenem Patient maßgeblich.

Phase 1: Entstauungsphase

In Phase 1 der Therapie werden alle Bausteine der KPE möglichst 1–2x täglich angewandt. Die Aufklärung, Schulung und Einbindung des Patienten in die Behandlung ist in dieser Phase besonders wichtig, denn die Maßnahmen sind zeitintensiv und erfordern die aktive Mitwirkung des Betroffenen.

Phase 2: Erhaltungsphase

In Phase 2 werden die Bausteine der KPE je nach Befund und Beschwerden eingesetzt. Abhängig vom Krankheitsverlauf kann es sein, dass die Phase 1 wiederholt werden muss – insbesondere bei zwischenzeitlich auftretenden Erkrankungen. Auch in dieser zweiten Phase sollte der betroffene Patient entsprechend mitwirken.

Aufklärung und Schulung des Patienten

Entscheidend für den Erfolg der KPE ist, dass der Patient über seine Erkrankung aufgeklärt und informiert wird. Zu Beginn der Therapie sind schriftliche Informationen sinnvoll – hier bietet Juzo leicht verständliche kostenlose Broschüren und Online-Informationen für Patienten und Angehörige an. Wenn der Patient das Krankheitsbild verstanden und akzeptiert hat, wird es einfacher, mit ihm über die Möglichkeiten zu sprechen, die er als Betroffener hat. Denn auch er selbst kann durch eigenes Handeln sein Krankheitsbild verbessern und seine Beschwerden lindern. In manchen Fällen kann eine psychologische Begleitung oder der Besuch einer

Selbsthilfegruppe sinnvoll sein. Im Rahmen von Patientenschulungen können spezifische Fragen zur Erkrankung und zu den einzelnen Therapie-Bausteinen beantwortet werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Erlernen des Anlegens von lymphologischen Kompressionsverbänden: die Selbstbandagierung. Neben der Kompressionstherapie, die der Betroffene so aktiv unterstützen kann, gibt es zusätzliche Möglichkeiten zur Eigenbehandlung. Dazu gehören beispielsweise die richtige Hautpflege, Atemtechniken und Entstauungsgymnastik, die in Patienten-Trainings erlernt werden können.

Die Eigenbehandlung durch den Patienten ist eine ergänzende Maßnahme zu den in der medizinischen Leitlinie definierten KPE-Bausteinen. Sie ersetzt nicht die Manuelle Lymphdrainage mit Kompressionstherapie durch Therapeuten bzw. die Kompressionsbestrumpfung durch den medizinischen Fachhandel. Alle Maßnahmen sollten Hand-in-Hand erfolgen, um einen Langzeiterfolg der Ödemtherapie zu ermöglichen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Innovative Hilfen für die ergänzende Selbstbandagierung

Juzo bietet eine Vielzahl von Produkten für die Eigentherapie, die durch einfache und schnelle Anwendung sowie effektive Wirkung zu einer spürbaren Steigerung der Lebensqualität beitragen.

Insbesondere für die Anwendung durch den Patienten während der Entstauungsphase oder bei weiterem Bedarf in der Erhaltungsphase eignen sich die Juzo ACS Light Produkte und die Juzo SoftCompress Bandagehilfen. Diese Produkte sind praktisch in der Anwendung und in jeder Phase der KPE zur Unterstützung des Behandlungserfolges geeignet.

Die kurzzügigen Juzo ACS Light Kompressionssegmente können mit Klettverschlüssen durch den Patienten individuell angepasst werden. Durch die eingearbeitete Fixierhilfe sind die Juzo ACS Light Segmente einfach in der Handhabung und können schnell an den Beinen oder Armen angelegt werden. Der Erfolg der Entstauungstherapie kann durch den Einsatz von Juzo SoftCompress deutlich gesteigert werden. Durchdachte Produktdetails sorgen für eine optimale Druckübertragung und vermeiden zu starke Scher- und Reibkräfte beispielsweise an sensiblen Körperstellen.

Diese innovativen Produkte lassen sich abhängig von Krankheitsbefund und körperlichen Gegebenheiten der Patienten gezielt und effizient einsetzen. Viele davon sind auch als Maßanfertigungen mit individueller Passform erhältlich. Durch zahlreiche auf die Kompressionsversorgung abgestimmte Zusatzprodukte von Juzo, wie z. B. verschiedene An- und Ausziehhilfen oder Lymph Lotion für die tägliche Pflege der Haut, wird die Anwendung erleichtert.

Um eine Ödemtherapie dauerhaft erfolgreich durchführen zu können, bedarf es Produktlösungen, die sich durch schnelle und unkomplizierte Anwendung auszeichnen.





Juzo SoftCompress

Kompressionsbandagierung

Mit Juzo SoftCompress kann der Erfolg der Entstauungstherapie deutlich gesteigert werden. Die Bandagehilfen und Zusatzprodukte zeichnen sich, im Gegensatz zu häufig verwendeten Synthetikmaterialien, durch eine besonders hautfreundliche Baumwolloberfläche aus. Diese ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Die vertikal verlaufenden Schaumstoffkanäle bilden eine einzigartige Oberflächenstruktur, die den Abfluss der Lympheflüssigkeit unterstützt. Zudem ermöglichen die Juzo SoftCompress Bandagehilfen dem Patienten eine einfache Eigenanwendung und sichern somit den Therapieerfolg langfristig.

Eigenschaften

- + Besondere Hautverträglichkeit durch Baumwolloberfläche
 - Atmungsaktiv
 - Anschmiegsam
- + Kern aus hochwertigem Schaumstoff (5 – 9 mm)
 - Optimale Druckübertragung
 - Ideale Druckverteilung
- + Vertikal genähte Schaumstoffkanäle
 - Steigerung des Lymphabflusses
 - Effektiv gegen Bindegewebsfibrosen
- + Abschnürung in Gelenkbeugen wird verhindert
- + Schützt vor dem Einschneiden durch Bindenkanten
- + Zeitersparnis bei der Bandagierung
- + Erleichterung der Selbstbandagierung
- + Waschbar bis zu 60 °C
- + Desinfektion und Aufbereitung möglich – dadurch langfristig kostensparend
- + Diverses Zubehör erhältlich
- + **Juzo SoftCompress Bandagehilfen können unter Kurzzugbinden oder in Verbindung mit ACS Light getragen werden**

Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- Phlebödem
- Posttraumatisches Ödem
- Postoperatives Ödem
- Fibrosen

Kontraindikationen

Siehe Seite 30

Farbe



Weiß



Schaumstoffkanäle

Die vertikal genähten Schaumstoffkanäle fördern den Lymphabfluss.



Wirkungsweise

Sichtbare Wirkungsweise der Juzo SoftCompress Bandagehilfe beim Beinlymphödem.

Bandagehilfen

Die komfortablen Juzo SoftCompress Bandagehilfen können in der Phase 1 der KPE unter Kurzzugbinden oder in der Phase 2 unter medizinischen Kompressionsstrümpfen oder Juzo ACS Light getragen werden und sorgen für zusätzliche Kompression und Polsterung sowie eine ideale Druckverteilung. Durch die Verwendung der Bandagehilfen wird das Bandagieren schneller sowie effektiver und erleichtert dem Patienten auch die Selbstbandagierung. Sie sind erhältlich in Universalgrößen, Seriengrößen und als Maßanfertigungen. Maßgefertigte Bandagehilfen können auch zur Nachtversorgung genutzt werden.

Für KPE Phase 1



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel
Universalgröße
Art. 6831



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Bein
Universalgröße
Art. 6821



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm
Universalgröße
Art. 6823

Universalgröße

Bandagehilfen in Universalgröße sind an der Rückseite offen und werden mit Hilfe von Klettbindern bzw. einem elastischen Textilschlauch fixiert. Dadurch lässt sich die Bandagehilfe während der Therapie individuell an stark schwankende Umfangmaße anpassen.

Serien- und Universalgrößen sind an den entsprechenden Schnittmarkierungen kürzbar.

Achtung: Vor dem Kürzen zwischen den Quernähten muss das Produkt einmal gewaschen und vor dem Trocknen im nassen Zustand längsgedehnt worden sein.



Für KPE Phase 2



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel
Seriengrößen und nach Maß
Art. 6830



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Bein
Nach Maß
Art. 6820



Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm
Seriengrößen und nach Maß
Art. 6822

Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN		
		Seriengrößen	Maßanfertigung	Universalgröße
	6831 Bandagehilfe Unterschenkel (für KPE Phase 1) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel	–	–	13505730
	6830 Bandagehilfe Unterschenkel (für KPE Phase 2)	Größe 1 · 13505687 Größe 2 · 13505693 Größe 3 · 13505701 Größe 4 · 13505718 Größe 5 · 13505724	keine PZN	–
	6821 Bandagehilfe Bein (für KPE Phase 1) inkl. Bandagehilfe Unterschenkel Universal 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle 1 Kompressionsbinde (10 cm x 4 m) 1 Kompressionsbinde (12 cm x 4 m)	–	–	13505641
	6820 Bandagehilfe Bein (für KPE Phase 2) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	–	keine PZN	–
	6823 Bandagehilfe Arm (für KPE Phase 1) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	–	–	13505842
	6822 Bandagehilfe Arm (für KPE Phase 2) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	Größe 1 · 13505747 Größe 2 · 13505753 Größe 3 · 13505782 Größe 4 · 13505799 Größe 5 · 13505807 Größe 6 · 13505836	keine PZN	–

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

Größentabellen Seriengrößen

Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel

Art. 6830 Länge in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm				
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
PD 38,0 – 46,0	cD 27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0
	cC 29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5
	cB' 23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5
	cB 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5
	cY 28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5
	cA 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5

Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm

Art. 6822 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PG 46,0 – 51,0	cG 30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
	cF 28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
PE 21,0 – 25,0	cE 25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	cD 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	cC 14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0

WICHTIG: Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt. Für Maßanfertigungen bitte „auf Zug“ messen.

LymphAid und BandageAid

Die Komplettlösung für die lymphologische Kompressionsbandagierung bieten die Juzo SoftCompress Varianten LymphAid und BandageAid. Gegenüber herkömmlichen Sets beinhalten diese zusätzlich die innovativen Juzo SoftCompress Materialien, durch deren Einsatz der Therapieerfolg deutlich gesteigert werden kann. LymphAid ist mit einer vorgefertigten Bandagehilfe ausgestattet und eignet sich dadurch auch für die Selbstbandagierung. Die kostengünstigere BandageAid beinhaltet die Juzo SoftCompress Kompressionsbinden.

LymphAid



**Juzo SoftCompress
LymphAid Bein klein**
Art. 6800 KL



**Juzo SoftCompress
LymphAid Bein groß**
Art. 6800 GR



**Juzo SoftCompress
LymphAid Arm**
Art. 6801

BandageAid



**Juzo SoftCompress
BandageAid Bein klein**
Art. 6810 KL









**Juzo SoftCompress
BandageAid Bein groß**
Art. 6810 GR



**Juzo SoftCompress
BandageAid Arm**
Art. 6811

Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN Universalgröße
	6800 KL LymphAid Bein klein (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13506244
	6800 GR LymphAid Bein groß (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 1 Kompressionsbinde 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 6 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13506238
	6801 LymphAid Arm (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Arm Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13506221
	6810 KL BandageAid Bein klein (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13505670
	6810 GR BandageAid Bein groß (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 2 Kompressionsbinden 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13505664
	6811 BandageAid Arm (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 5 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13505658

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie



Kurzvideos zur Bandagierung mit Juzo SoftCompress finden Sie unter www.juzo.de/softcompress

Die in LymphAid und BandageAid befindlichen Mull- und Kurzzugbinden sind Qualitätsprodukte der Karl Otto Braun GmbH & Co. KG (KOB). Sie sind auch separat bei Juzo erhältlich.



Kompressionsbinde und -platte

Die Juzo SoftCompress Bandagematerialien werden für die lymphologische und phlebologische Kompressionsbandagierung verwendet. Dank der weichen Oberfläche sind sie sehr anschmiegsam, hautfreundlich und atmungsaktiv.



Juzo SoftCompress Kompressionsbinde

Art. 6835

Die dünnen, anschmiegsamen Juzo SoftCompress Kompressionsbinden erzeugen durch entsprechendes Anlegen bereits einen Kompressionsdruck. Die Kompressionsbinden verteilen den Druck der zusätzlich darüber aufgetragenen Kurzzugbinden gleichmäßig und verhindern dadurch Einschnürungen.



Juzo SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836

Die Kompressionsplatten können individuell zugeschnitten werden und sind somit in verschiedenen Körperregionen einsetzbar. Es wird empfohlen, die Schnittkanten abzunähen.

Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN Seriengrößen
6835	Kompressionsbinde (für KPE Phase 1)	
	5 mm, 8 cm x 4 m	Größe 1 · 13506043
	5 mm, 10 cm x 4 m	Größe 2 · 13506066
	5 mm, 12 cm x 4 m	Größe 3 · 13506072
	5 mm, 16 cm x 4 m	Größe 4 · 13506089
6836	Kompressionsplatte (für KPE Phase 1)	
	65 x 65 cm	Größe 1 · 13506095
	125 x 100 cm	Größe 2 · 13506103

Größentabellen

Juzo SoftCompress Kompressionsbinde


Art. 6835	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
Stärke in mm: 5,0 	1	400,0 x 8,0
	2	400,0 x 10,0
	3	400,0 x 12,0
	4	400,0 x 16,0

Juzo SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	65,0 x 65,0
	2	125,0 x 100,0


Zusatzprodukte

Juzo SoftCompress Einlagen bzw. Pelotten können unter Kompressionsbandagen oder -bekleidung getragen werden. Sie eignen sich besonders zur gezielten Druckerhöhung bei speziell lokalisierten Ödemen.

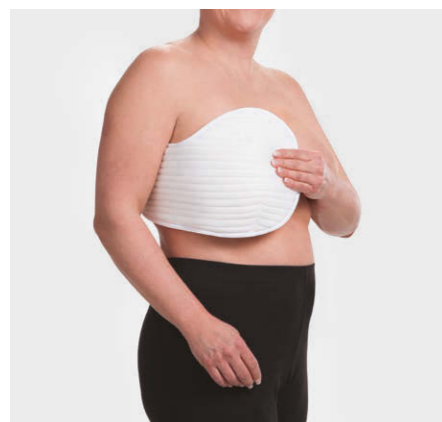

**Juzo SoftCompress
Brusttrichter**
Art. 6837

Der Juzo SoftCompress Brusttrichter dient als angenehme Einlage für Kompressions-BHs bzw. Thoraxbandagen, z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.

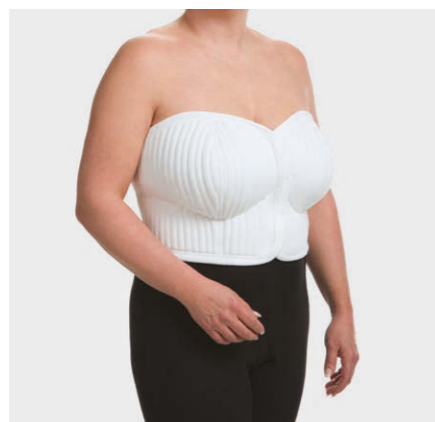

**Juzo SoftCompress
Brustbandage**
Art. 6838

Die Juzo SoftCompress Brustbandage kombiniert die positiven Eigenschaften des Juzo SoftCompress Materials mit einem Kompressions-BH. Der Brustumfang der Bandage ist verstellbar. Anwendbar ist die Brustbandage z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.



**Juzo SoftCompress
Genitaleinlage für Frauen**
Art. 6839

Die Juzo SoftCompress Einlage für den weiblichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Dies sorgt bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und Polsterung sowie ideale Druckverteilung.



**Juzo SoftCompress
Pelotten für die Fußknöchel**
Art. 6843

Die Juzo SoftCompress Pelotten für die Fußknöchel dienen zur Abpolsterung der Bisgaard'schen Kulissen im Knöchelbereich. Dies sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung. Die Pelotten werden paarweise ausgeliefert.



**Juzo SoftCompress
Handkomresse**
Art. 6844

Die Juzo SoftCompress Handkomresse ist eine spezielle Handrückenpelotte mit zwei Fingeröffnungen. Sie sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung.



**Juzo SoftCompress
Genitaleinlage für Männer**
Art. 6840

Die Juzo SoftCompress Einlage (wendbar) für den männlichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Die breite Kanalstruktur dient der Druckerhöhung und der Steigerung des Lymphabflusses, während sich die schmalen Kanäle für das Reduzieren fibrotischer Verhärtungen eignen. Zusätzlich wird bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und eine ideale Druckverteilung gesorgt.



**Juzo SoftCompress
Einlage für die Kniekehle**
Art. 6845

Die Juzo SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Kniekehle.



**Juzo SoftCompress
Einlage für die Ellenbeuge**
Art. 6842

Die Juzo SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Ellenbeuge.



**Juzo SoftCompress
Kurzzugbinden**
Art. 6846

Die Kurzzugbinden bestehen aus 100 % Baumwolle und ermöglichen Kompressionsverbände mit niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Sie sind bis 95 °C waschbar und mit Wasserdampf (121 °C) sterilisierbar.



**Juzo SoftCompress
Rapidelast V Mullbinden**
Art. 6847/6848

Die Rapidelast V Mullbinden bestehen aus 60 % Polyamid und 40 % Viskose. Sie dienen zur Fixierung von Kompressen und Polstermaterial vor allem auf empfindlicher Haut oder an Gelenken – ohne den Bewegungsspielraum einzuschränken. Verbände mit Rapidelast V sind rutschfest. Die hohe Elastizität des Gewebes macht seine Anwendung schnell und einfach.



**Juzo SoftCompress
Schlauchverband**
Art. 6849

Der Schlauchverband besteht aus 100 % Baumwolle und ist besonders dehnfähig und hautfreundlich. Er schützt die Haut ohne einzuschnüren und kann auch zum Fixieren von Einlagen verwendet werden.

Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN	
		Seriengrößen	Maßanfertigung
6837	Brusttrichter (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A – B Cup C – D Cup E – F	Größe 1 · 13505919 Größe 2 · 13505925 Größe 3 · 13505931	keine PZN
6838	Brustbandage (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F	Größe 1 · 13505859 Größe 2 · 13505865 Größe 3 · 13505871 Größe 4 · 13505888 Größe 5 · 13505894 Größe 6 · 13505902	–
6839	Genitaleinlage für Frauen (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 20 cm 30 x 28 cm 40 x 32 cm	Größe 1 · 13505977 Größe 2 · 13505983 Größe 3 · 13506008	keine PZN
6840	Genitaleinlage für Männer (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 28 cm 23 x 30 cm 26 x 32 cm	Größe 1 · 13505948 Größe 2 · 13505954 Größe 3 · 13505960	keine PZN
6845	Einlage für die Kniekehle (für KPE Phase 1 und 2)	Universalgröße	
	13 x 17 cm (Maßanfertigung max. 19 x 23 cm)	13506014	keine PZN
6842	Einlage für die Ellenbeuge (für KPE Phase 1 und 2)	Universalgröße	
	10 x 13 cm (Maßanfertigung max. 13 x 16 cm)	13506020	keine PZN
6844	Handkomresse (für KPE Phase 1 und 2)	Universalgröße	
	8,5 x 24 cm	13506037	keine PZN
6843	Pelotten für die Fußknöchel (für KPE Phase 1 und 2)	Universalgröße	
	6,5 x 9 cm Paarweise verpackt	13506250	keine PZN

Art.	Ausführung	PZN	
		Stück	Karton
6846	Kurzzugbinde (für KPE Phase 1)		10 Stück
	6 cm x 5 m 8 cm x 5 m 10 cm x 5 m 12 cm x 5 m	13506215 13506190 13506178 13506184	13506161 13506149 13506126 13506132
	Rapidelast V Mullbinde (für KPE Phase 1)		20 Stück
6847	6 cm x 4 m (für die Finger)	–	13506267
6848	4 cm x 4m (für die Zehen)	–	13506273
6849	Schlauchverband (für KPE Phase 1)		
	6 cm x 20 m 8 cm x 20 m 10 cm x 20 m	13506296 13506304 13506310	– – –

Größentabellen

Juzo SoftCompress Brusttrichter

Art. 6837	Seriengrößen	Cup
	1	A – B
	2	C – D
	3	E – F

Juzo SoftCompress Brustbandage

Art. 6838	Seriengrößen	Cup	Brustumfang in cm	Unterbrustumfang in cm
	1	A	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	2	B	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	3	C	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	4	D	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	5	E	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0
	6	F	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0

Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 20,0
	2	30,0 x 28,0
	3	40,0 x 32,0

Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Männer

Art. 6840	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 28,0
	2	23,0 x 30,0
	3	26,0 x 32,0

Juzo ACS Light

Variable Kompressionssysteme

Die kurzzügigen Kompressionssegmente Juzo ACS Light werden zur zusätzlichen Versorgung während der Entstauungstherapie eingesetzt. Die Produkte sind durch das eingearbeitete Inlett (Fixierhilfe) leicht anzulegen. Sie lassen sich durch verstellbare Verschlüsse individuell an den Patienten anpassen – auch bei sich verändernden Umfängen während der Therapie. Diese unkomplizierte Anwendung erhöht die Therapietreue und unterstützt den Patienten bei der Selbsttherapie. Mit Juzo ACS Light kann ein therapeutischer Kompressionsdruck von bis zu 40 mmHg erzielt werden.

Eigenschaften

- + Hoher Arbeits- und niedriger Ruhedruck
- + Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- + Material besonders strapazierfähig
- + Kann Tag und Nacht getragen werden
- + Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- + Selbstständige Anwendung – auch bei eingeschränkter Beweglichkeit und Kraft
- + Einfach anzuziehen durch den Patienten dank der eingearbeiteten Fixierhilfe
- + Diverses Zubehör erhältlich
- + **Juzo ACS Light Segmente können auch mit Juzo SoftCompress Produkten kombiniert werden**


Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- Phlebödem
- Posttraumatisches Ödem
- Postoperatives Ödem

Kontraindikationen

Siehe Seite 30

Farben

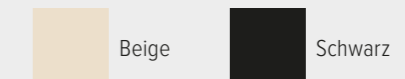

Klettverschlüsse

Mithilfe der Klettverschlüsse können die Produkte an verschiedene und sich verändernde Körperumfänge angepasst werden.



Sicherer Halt

Dank des eingearbeiteten Inletts (Fixierhilfe) sind die Segmente im Handumdrehen angelegt und sitzen perfekt. Der eingenähte Hafttrand verhindert ein Verrutschen.



Tragekomfort

Eine separat beigelegte Pelotte beim Arm- und Handsegment bietet zusätzlichen Komfort.



Anatomische Passform

Die Kompressionssegmente sind optimal an die verschiedenen Körperregionen angepasst. Die Segmente für Unterschenkel, Oberschenkel und Arm sind jeweils für links und rechts erhältlich.

Untere Extremität

Juzo ACS Light variable Kompressionssysteme für die untere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Fuß, Unterschenkel oder dem gesamten Bein eingesetzt werden können. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Unterschenkel und Fuß können kombiniert werden. Bei Bedarf können zusätzlich das Knie- und Oberschenkelsegment für die Versorgung des gesamten Beines hinzugefügt werden. Als Unterziehstrumpf empfiehlt sich der separat erhältliche Juzo Liner.



Lieferprogramm

Art.	Ausführung Längen in cm	PZN			
		Seriengrößen			
J701LI	Fußsegment	Beige		Schwarz	
		Größe 1 · 13885141 Größe 2 · 13885129 Größe 3 · 13885112 Größe 4 · 13885046 Größe 5 · 13885135	Größe 1 · 13885023 Größe 2 · 13885098 Größe 3 · 13885081 Größe 4 · 13885075 Größe 5 · 13885017	Größe 1 · 13575417 Größe 2 · 13575392 Größe 3 · 13575386 Größe 4 · 13575334 Größe 5 · 13575400	Größe 1 · 13575305 Größe 2 · 13575363 Größe 3 · 13575357 Größe 4 · 13575340 Größe 5 · 13575297
J702LI	Unterschenkelsegment	Beige/links	Beige/rechts	Schwarz/links	Schwarz/rechts
		Größe 1 · 13884928 Größe 2 · 13884905 Größe 3 · 13884897 Größe 4 · 13884880 Größe 5 · 13884911	Größe 1 · 13884992 Größe 2 · 13884957 Größe 3 · 13884940 Größe 4 · 13884934 Größe 5 · 13884986	Größe 1 · 13575222 Größe 2 · 13575191 Größe 3 · 13575185 Größe 4 · 13575179 Größe 5 · 13575216	Größe 1 · 13575280 Größe 2 · 13575251 Größe 3 · 13575245 Größe 4 · 13575239 Größe 5 · 13575268
J703LI	Knie	Beige		Schwarz	
		Größe 1 · 13885230 Größe 2 · 13885218 Größe 3 · 13885201 Größe 4 · 13885193 Größe 5 · 13885224	Größe 1 · 13885514 Größe 2 · 13885483 Größe 3 · 13885477 Größe 4 · 13885460 Größe 5 · 13885508	Größe 1 · 13575759 Größe 2 · 13575736 Größe 3 · 13575713 Größe 4 · 13575707 Größe 5 · 13575742	Größe 1 · 13575802 Größe 2 · 13575788 Größe 3 · 13575771 Größe 4 · 13575765 Größe 5 · 13575794
J704LI	Oberschenkelsegment	Beige/links	Beige/rechts	Schwarz/links	Schwarz/rechts
		Größe 1 · 13885402 Größe 2 · 13885388 Größe 3 · 13885371 Größe 4 · 13885365 Größe 5 · 13885394	Größe 1 · 13885454 Größe 2 · 13885431 Größe 3 · 13885425 Größe 4 · 13885419 Größe 5 · 13885448	Größe 1 · 13575630 Größe 2 · 13575593 Größe 3 · 13575587 Größe 4 · 13575570 Größe 5 · 13575624	Größe 1 · 13575699 Größe 2 · 13575676 Größe 3 · 13575653 Größe 4 · 13575647 Größe 5 · 13575682
J705LI	Fußsegment	Beige/links	Beige/rechts	Schwarz/links	Schwarz/rechts
		Größe 1 · 13885804 Größe 2 · 13885721 Größe 3 · 13885715 Größe 4 · 13885709 Größe 5 · 13885796	Größe 1 · 13885744 Größe 2 · 13885773 Größe 3 · 13885767 Größe 4 · 13885750 Größe 5 · 13885738	Größe 1 · 13576032 Größe 2 · 13575943 Größe 3 · 13575937 Größe 4 · 13575920 Größe 5 · 13576026	Größe 1 · 13575972 Größe 2 · 13576003 Größe 3 · 13575995 Größe 4 · 13575989 Größe 5 · 13575966

Farben



Beige




Schwarz



Videos zum korrekten Anlegen der Juzo ACS Light Segmente finden Sie unter www.juzo.de/acslight

Größentabellen


Juzo ACS Light Fußsegment

Art. J701LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen - Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cA Zehengrundgelenk	22,0 – 24,0	25,0 – 27,0	28,0 – 30,0	31,0 – 34,0	35,0 – 40,0
	PA					
	normal	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
	lang	18,5	20,0	21,5	23,0	25,0


Juzo ACS Light Unterschenkelsegment

Art. J702LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen - Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cd'					
	cC stärkste Stelle Wade	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0
	cB Fußgelenk	20,0 – 27,0	25,0 – 32,0	30,0 – 38,0	37,0 – 44,0	45,0 – 52,0
	PBD					
	normal	30,0	30,0	35,0	35,0	37,0
	lang	35,0	35,0	40,0	40,0	42,0
		* unterhalb Kniescheibe				

Juzo ACS Light Kniesegment

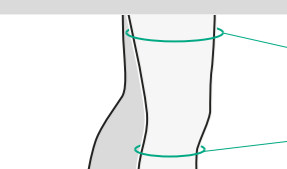Art. J703LI	Umfang c	Seriengrößen - Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cF 10 cm oberhalb Kniescheibe	40,0 – 55,0	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 85,0	85,0 – 100,0
	cD unterhalb Kniescheibe	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0

Juzo ACS Light Oberschenkelsegment

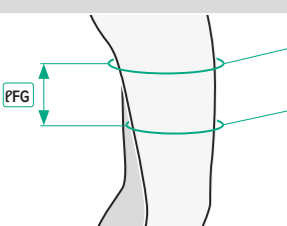Art. J704LI	Umfang c Länge P	Seriengrößen - Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cG stärkste Stelle Oberschenkel	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 80,0	75,0 – 90,0	85,0 – 100,0
	cF 10 cm oberhalb Kniescheibe	45,0 – 52,0	53,0 – 59,0	60,0 – 66,0	67,0 – 73,0	74,0 – 80,0
	PFG					
	PFG					
	normal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	lang	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Leicht erklärt in
wenigen Schritten

Videos zum korrekten Anlegen der
Juzo ACS Light Segmente unter
www.juzo.de/acslight

 **Juzo**

www.juzo.de

Lebensfreude in Bewegung

Obere Extremität

Juzo ACS Light variable Kompressionssysteme für die obere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Arm und Hand eingesetzt werden. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Arm und Hand können kombiniert werden. Das Handsegment ist besonders zur Behandlung von Ödemen im Bereich des Handrückens geeignet.



Videos zum korrekten Anlegen der Juzo ACS Light Segmente finden Sie unter www.juzo.de/acslight

Lieferprogramm

Art.	Ausführung Längen in cm	PZN			
		Seriengrößen			
J705LI	Handsegment	Beige		Schwarz	
		Größe 1 · 13885187		Größe 1 · 12598698	
		Größe 2 · 13885170		Größe 2 · 12598675	
		Größe 3 · 13885164		Größe 3 · 12598652	
J706LI	Armsegment	Links		Rechts	
		Schwarz/links		Schwarz/rechts	
		Größe 1 · 13885282		Größe 1 · 13885336	
		Größe 2 · 13885276		Größe 2 · 13885313	
J706LI	normal 42,0 – 47,0	Größe 3 · 13885253		Größe 3 · 13885307	
		Größe 4 · 13885247		Größe 4 · 13885299	
		Größe 5 · 13891727		Größe 5 · 13891733	
		Größe 1 · 13885690		Größe 1 · 13885655	
		Größe 2 · 13885626		Größe 2 · 13885684	
	lang 46,0 – 50,0	Größe 3 · 13885603		Größe 3 · 13885678	
		Größe 4 · 13885589		Größe 4 · 13885661	
		Größe 5 · 13891762		Größe 5 · 13891779	
		Größe 1 · 13575512		Größe 1 · 13575558	
		Größe 2 · 13575506		Größe 2 · 13575541	

Farben



Beige



Schwarz

Größentabellen

Juzo ACS Light Handsegment

Art. J705LI	Umfang c	Seriengrößen · Maße in cm			
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L
	Fingergrundgelenke	< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

Juzo ACS Light Armsegment

Art. J706LI	Umfang c Länge l	Seriengrößen · Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cG Oberarm	25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
	cE Ellbogen	23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
	cC Handgelenk	14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
	normal	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
	lang	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0

Zubehör

Für Juzo ACS Light sind verschiedene Zusatzprodukte für sicheren Halt, zusätzlichen Tragekomfort und die Versorgung größerer Umfänge erhältlich. Sie sind einfach anzuwenden und eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten.



Juzo ACS Light Hüftband

Art. J711


Das Juzo ACS Light Hüftband kann bei Bedarf zur Fixierung des Oberschenkelsegments eingesetzt werden.



Juzo ACS Light Zusatzband

Art. J712

Das Juzo ACS Zusatzband wurde speziell für die Kompression des Rumpfes (z.B. Thorax, Hüfte, Bauch und/oder Genitalbereich) entwickelt. Es kann individuell zugeschnitten werden und ist dank der universell einsetzbaren Klettverschlüsse einfach anzulegen.

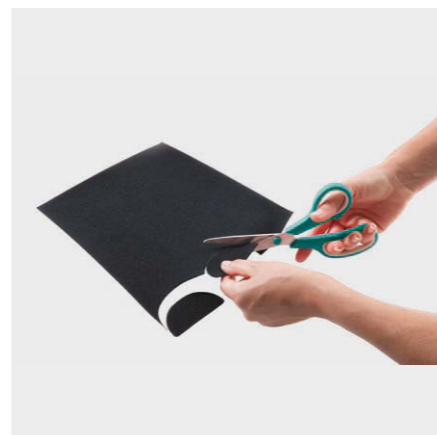

Juzo ACS Light Klettverschlussplatte

Art. J713

Die Juzo ACS Klettverschlussplatte ermöglicht ein individuelles Zuschneiden von zusätzlichen Klettverschlüssen.



Juzo ACS Light Pelotten

Art. J714

Die Juzo ACS Light Pelotten können zur zusätzlichen Polsterung für mehr Tragekomfort und/oder zur lokalen Druckerhöhung eingesetzt werden.



Juzo ACS Light Antirutsch-Band

Art. J715

Das individuell kürzbare Juzo ACS Light Antirutsch-Band bietet eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit. Es kann unter dem Zusatzband oder Hüftband, aber auch unter dem Oberschenkelsegment getragen werden – für optimalen Halt.



Juzo ACS Light Extender

Art. J716

Der Juzo ACS Light Extender dient zur Verstärkung der Kompression an den Extremitäten (z. B. Sprunggelenk, Hand- oder Fußrücken).

Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN	
		Universalgröße - Beige	Universalgröße - Schwarz
J711	Hüftband Hüftteil mit aufgenähtem Microklett Separater Taillengurt inkl. 1 losen Klettverschluss Farben: Beige, Schwarz	13884874	13575162
J712	Zusatzband Zusätzliches Band inkl. 6 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	Seriengrößen - Beige Größe 1 - 13885810 Größe 2 - 13885827	Seriengrößen - Schwarz Größe 1 - 13576049 Größe 2 - 13576055
J713	Klettverschlussplatte Individuell zuschneidbar Farben: Beige, Schwarz	13885833	13576109
J714	Pelotten Farben: Set mit 2 Stärken Farbe: Grau	Seriengrößen - Grau Größe 1 - 13576061 Größe 2 - 13576078 Größe 3 - 13576084 Größe 4 - 13576090	
J715	Antirutsch-Band Band mit einseitiger Neopren-Beschichtung inkl. 6 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	13884868	13575156
J716	Extender Verlängerungsband mit aufgenähten Klettstreifen inkl. 2 losen Klettverschlüssen Farben: Beige, Schwarz	13885000	12599284

Größentabellen

Juzo ACS Light Zusatzband

Art. J712	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0

Juzo ACS Light Pelotten

Art. J714	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
	1	9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0

Juzo Liner

Unterziehstrumpf für variable Kompressionssysteme



Juzo Liner

Art. 6082


Juzo Liner ist ein Unterziehstrumpf für das Produkt Juzo ACS Light. Er schont die empfindliche Haut und schützt eine ggfls. vorhandene Wundauflage beim An- und Ausziehen der variablen Kompressionssysteme. Der schwarze Strumpf wird als Paar geliefert. Juzo Liner ist jeweils in zwei verschiedenen Größen als Waden- und Schenkelstrumpf lieferbar.

Farbe



Schwarz

Lieferprogramm

Art. 6082	Form	Ausführung	PZN
			Seriengrößen
	AD	Wadenstrümpfe	Größe 1 · 13580298 Größe 2 · 13580306
	AG	Schenkelstrümpfe	Größe 1 · 13580312 Größe 2 · 13580329

Größentabelle

Juzo Liner

Art. 6082 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm	
	I / XS	II / S
PG AG normal 80,0 	50,0 – 75,0	76,0 – 99,0
PD AD normal 45,0 	29,0 – 48,0	48,0 – 69,0

Unterstützende Produkte für die Ödemtherapie

Zusatzprodukte



Juzo Lymph Lotion

Art. 9860

Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödemem



Juzo Spezialwaschmittel

Art. 9000

Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung



Juzo Spezialhandschuhe

Art. 9301

Textilhandschuh zum schonenden Anlegen und besseren Verteilen des Gestricks

Lymphpads



Juzo Lymphpad Square

Art. 9431

Behandlungshilfe für Lymph- und Lipödem zur Anregung der Mikrozirkulation im Gewebe



Juzo Lymphpad Line

Art. 9430

Behandlungshilfe für Lymph- und Lipödem zur Anregung der Mikrozirkulation im Gewebe

Tagebuch Lymphödem



Hilfe beim Selbstmanagement: Das Juzo Tagebuch Lymphödem

Art. W334 LY

Mit diesem Tagebuch erhält der Patient die Möglichkeit, den Therapieverlauf selbst zu dokumentieren und zu verfolgen

Wichtige Informationen

Juzo SoftCompress und Juzo ACS Light

Juzo SoftCompress

Materialzusammensetzung

Bezug: 100 % Baumwolle

Schaumstoff: 100 % Polyurethan

Wasch- und Pflegeanleitung



Juzo SoftCompress Produkte sollten täglich gewaschen werden. Die Produkte können in der Waschmaschine bei 60 °C mit Feinwaschmittel gewaschen werden. Keinen Weichspüler verwenden. Bleichen nicht erlaubt. Produkte im nassen Zustand vor dem Trocknen in die Länge ziehen. Die Trockenzeit kann verkürzt werden, indem die Produkte nach dem Waschen auf ein dickes Frotteehandtuch gelegt, fest eingerollt und kräftig ausgedrückt werden. Nicht im Handtuch liegen lassen und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen. Juzo SoftCompress Produkte dürfen nicht gebügelt werden. Juzo SoftCompress darf nicht chemisch gereinigt werden.

Bitte beachten

Bezugsstoff kann sich durch den Einfluss von Schweiß, Hautpflegemitteln, mechanischer Beanspruchung und Sonneneinstrahlung farblich und strukturell verändern. Vor dem Kürzen zwischen den Quernähten müssen die Produkte einmal gewaschen und vor dem Trocknen im nassen Zustand längsgedehnt worden sein.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Aufbereitung und Desinfektion

- Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.
- Unter Beachtung der Vorgaben der Leitlinie von DGKH, DGSV ist eine quantifizierbare Aufbereitung, Reinigung und Desinfektion von Juzo SoftCompress und Juzo ACS Light möglich.



Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen

- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium III/IV
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Akute tiefe Thrombose
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Akutes Erysipel
- Akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen
- Unbehandelte oder fortgeschrittene Hauterkrankungen/Kontaktzyme
- Unbehandelte offene Wunden
- Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache
- Unbehandelte maligne Tumore

Wichtig

Bestehen offene Wunden im Versorgungsbereich, muss nach Rücksprache mit dem Arzt der Wundbereich zunächst mit einer entsprechenden Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor Juzo SoftCompress oder Juzo ACS Light Produkte angelegt werden.

Juzo ACS Light

Materialzusammensetzung

85 % Polyamid

15 % Elasthan

Wasch- und Pflegeanleitung



Juzo ACS Light Produkte sollten mindestens einmal pro Woche gewaschen werden, bei Bedarf häufiger. Vor dem Waschen müssen alle Klettverschlüsse geschlossen bzw. (falls lose) entfernt werden. Die Produkte können in der Waschmaschine bei 30 °C mit Feinwaschmittel gewaschen werden. Tipp: Ein Wäschenetz schützt das Produkt zusätzlich. Keinen Weichspüler verwenden. Bleichen nicht erlaubt. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Die Trockenzeit kann verkürzt werden, indem die Produkte nach dem Waschen auf ein dickes Frotteehandtuch gelegt, fest eingerollt und kräftig ausgedrückt werden. Nicht im Handtuch liegen lassen und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen. Juzo ACS Light Produkte dürfen nicht gebügelt werden. Juzo ACS Light dürfen nicht chemisch gereinigt werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Juzo Lymphologische Symposien 2019

Für Mitarbeiter aus dem medizinischen Fachhandel, Ärzte und Therapeuten

Die Beratung und Versorgung von Ödempatienten erfordert in der Praxis fundiertes Wissen, Einfühlungsvermögen und ständige Weiterbildung. Die Juzo Akademie unterstützt Sie dabei und bietet Ihnen mit den überregionalen Symposien eine Plattform für den interdisziplinären und interprofessionellen Austausch. Informative Vorträge, interessante Workshops und anregende Diskussionen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr medizinisches und therapeutisches Fachwissen zu vertiefen. Seien auch Sie 2019 dabei!

Informieren Sie sich online und melden Sie sich an: www.juzo.de/symposien